

## ÖZELLİKLERİ

- Yapıştırıcı etiketi ile kolayca iç çamaşırınızın üzerine yapıştırarak uygulayabilirsiniz.
- İnce yapısı ile ergonomiktir ve uygulandığında rahatsızlık vermez.
- Kullanım süresi, dış ambalaj açıldıktan sonra 8 saat olup, kullanıcıya göre farklılıklar gösterebilir.

## KULLANIM ŞEKLİ

- Tek kullanımlıktır. Ambalaj açıldıktan sonra kullanım süresi başlar.
- Dış ambalaj ▲ işaretli yerden yırtarak açınız ve yapıştırıcı etiketi kaldırarak iç çamaşırınızın üzerinden düzgün bir şekilde yapıştırınız.
- Isıtıcı bandı soğuduğunda ya da çıkarmak istediğiniz zaman, çamaşırınıza zarar vermemek için yavaşça çekiniz.

## DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Isıtıcı bandı iç çamaşırınıza uygularken düzgün bir şekilde yapıştırmaya ve etiketin kendi iç yüzüne yapışmamasına dikkat ediniz.
- Isıtıcı bant kullanırken farkında olmadan düşük derecede sıcaklıkların uzun süre uygulanması sonucunda, özellikle hassas ciltli kişilerde düşük dereceli yanık olmaması için dikkat edilmelidir. Cildinizde kırmızı leke, su toplaması ya da kaşıntı olduğu takdirde kullanımı sona erdiriniz ve doktorunuza danışınız.
- Isıtıcı bandı direk cildinize uygulamayınız.
- Isıtıcı bant, uyurken farklı ısıtma araçları ile birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Rahatsız edecek derecede sıcaklık hissettiğinizde ısıtıcı bandı hemen çıkarınız.
- Isıtıcı bant, kemer ve benzeri şekilde tene baskı uygulayacak şekilde kullanılmamalıdır.

## İÇERİĞİ

- Demir tozu, su, aktif karbon, vermikülit, potasyum klorür

## SAKLAMA KOŞULLARI

- Son kullanma tarihine kadar etkinliğini sürdürebilmesi için güneş ışığından uzak ve serin yerde saklayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve ambalajında saklayınız.